

**Instructions:**

- Remove a nursing pad from its individual package.
- Remove the adhesive strip backing tape.
- Bring your bra into place toward your breast. When it is close enough, judge where the pad should sit in the cup in order to be centered on the nipple, press the adhesive side of the pad into the cup of the bra. Re-adjust for comfort.
- When your pad becomes damp, remove it promptly and throw it away to reduce the chance of infection or irritation. Replace with a new, clean nursing pad.

**Warning:**

- Change pad often to maintain the health of skin.
- Please be sure the pad packaging is removed completely.
- Keep pads and packaging material away from children and out of their reach.
- Dispose of pad and packaging properly.

**Instrucciones:**

- Extraiga una almohadilla de lactancia de su paquete individual.
- Retire la cinta de la tira adhesiva.
- Ajuste el sujetador en la posición de su seno. Cuando esté lo suficientemente cerca, calcule dónde debe permanecer la almohadilla en la copa del sujetador para que esté centrada en el pezón, apriete el lado adhesivo de la almohadilla contra la copa del sujetador. Reajuste para mayor comodidad.
- Cuando la almohadilla esté húmeda, retírela rápidamente y tírela para reducir la posibilidad de infección o irritación. Reemplácela con una almohadilla de lactancia nueva y limpia.

**Advertencia:**

- Cambie la almohadilla con frecuencia para mantener la salud de la piel.
- Por favor, asegúrese de haber quitado por completo la envoltura de la almohadilla.
- Mantenga las almohadillas y las envolturas fuera del alcance de los niños.
- Deseche las almohadillas y la envolturas de forma adecuada.



Super absorbent, disposable nursing pads.

Naturally contoured fit, ultra thin and discreet.

Individually wrapped for convenience and cleanliness.

Leakproof outer layer keeps clothing dry, day or night.

Gentle adhesive keep pads in place.

Available in 50 and 100 packs